

Easy Foal

SNELLE HANDLEIDING

**GEFELICITEERD, JE BENT NU ÉÉN
VAN DE EASYFOAL GEBRUIKERS!**



Legend :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1 Antenne | 4 Sensor |
| 2 Stroomkabel | 5 Zelfklevende
tape |
| 3 verlengkabel | |

Aan de slag met EasyFoal :

- 1** Voer een simkaart in de Antenne (te openen met 4 schroeven)
- 2** Sluit de antenne aan op de voeding (gebruik indien nodig de verlengkabel)
- 3** Wacht tot het LED-lampje elke 3 seconden groen knippert. (aan de linkerkant van de antenne)
- 4** Controleer de telefoonontvangst door « Cellq? » per sms naar het telefoonnummer van EasyFoal te sturen.
Antwoord :
< 6: Verplaats uw collector
6 tot 11: Zwak signaal (het werkt, maar probeer een andere plek)
> 11: Correct signaal
- 5** Wijzig de taal van EasyFoal. SMS:
« LangEn » Voor Engels
« LangDe » Voor Duits
« LangEs » Voor Spaans
- 6** Voeg de sensor toe aan de antenne door «ASSO» te SMS ´en, gevolgd door het nummer van de sensor (bijvoorbeeld: ASSO19496007)
- 7** Start de sensor met « START » gevolgd door het nummer van de sensor (bijvoorbeeld: START19496007)

- 8** Controleer de verbinding tussen de antenne en de sensor door « STATUT » te SMS ´en, gevolgd door het nummer van de sensor

Antwoord :

On stand by
Started
Stopped
Not Reached

Als het antwoord is: "Not Reached", controleer het nummer van de sensor in je SMS of breng de sensor dichterbij de antenne.

- 9** Stel het alarm in. (2x SMS en 2x telefoongesprek max)

SMS bericht :

Verstuur « NUMSMSA » gevolgd door het nummer van de sensor.

Verstuur « NUMSMSB » gevolgd door het nummer van de sensor.

Telefoongesprek :

Verstuur « NUMTELA » (or B) gevolgd door het nummer van de sensor.

Vergeet niet om de juiste landcode te vermelden voor het telefoonnummer (+31 voor Nederland)

- 10** Test het systeem door een SMS te sturen met «TEST» gevolgd door het nummer van de sensor. Je zou nu het veulen alarm moeten ontvangen door middel van een SMS of telefoongesprek.

Plaatsen van de sensor

1

Maak de staart van de merrie schoon met absorberend papier, zodat deze schoon en droog is.



2

Rol een eerste laag kleefverband rond de staart en ter hoogte van de anus en vulva uit (2 tot 3 slagen zijn voldoende). Zorg ervoor dat u hem niet strak trekt om een afknelling te voorkomen.



3

Plaats de sensor op het kleefverband aan de bovenkant van de vulva, met de pijl zichtbaar en naar boven gericht in lijn met de staart (plaats de sensor niet aan de onderkant van de vulva).



4

Bevestig de sensor losjes met een tweede laag kleefverband.



5

Scheur het verband met je hand zodat de punt onder de staart of aan de zijkanten komt.



6

Druk het verband goed aan zodat het stevig vast zit.



MONITORING

Dankzij het bevestigings-systeem kan de sensor gemiddeld maximaal 15 dagen op zijn plaats blijven. De positie van de sensor en de staat van de tape moeten echter regelmatig worden gecontroleerd.

Als de sensor naar beneden of opzij is gevallen, wordt aanbevolen de sensor opnieuw te positioneren met een nieuw kleefverband.

WAARSCHUWING ONTVANGEN

Gemiddeld waarschuwt EasyFoal 10 tot 20 minuten voor het veulenen, dus het is raadzaam om snel ter plaatse te zijn om te controleren of het veulenen goed gaat.

De sensor kan na het veulenen direct bij een andere merrie worden geplaatst.

